



1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Le fauteuil pour la mise à l'eau est une solution économique conçue pour faciliter le déplacement des personnes à mobilité réduite sur des surfaces instables telles que le sable, l'herbe ou le gravier, leur permettant ainsi de profiter pleinement de la plage et de la piscine.

En milieu aquatique, ses roues flottantes assurent une mise à l'eau et une sortie du bassin avec l'assistance d'une tierce personne.

L'utilisation du fauteuil requiert la présence constante d'un accompagnateur pour garantir la sécurité de l'utilisateur.



2. DOMAINE D 'APPLICATION

1. Accès aux plages :

Le fauteuil permet aux personnes à mobilité réduite de se déplacer facilement sur le sable, facilitant ainsi l'accès aux plages. Grâce à ses roues adaptées aux terrains meubles, il évite l'enlèvement et permet aux utilisateurs de profiter pleinement du bord de mer.

2. Utilisation en piscines publiques et privées

Ce fauteuil est particulièrement adapté aux piscines, où ses roues flottantes permettent une mise à l'eau et une sortie du bassin en toute sécurité avec l'aide d'un accompagnateur. Il constitue une solution idéale pour rendre les espaces aquatiques accessibles aux personnes en situation de handicap.

3. Déplacement sur terrains naturels :

Le fauteuil est conçu pour circuler sur des surfaces instables comme l'herbe ou le gravier, rendant ainsi accessibles des environnements naturels tels que les parcs, jardins ou sentiers aménagés.

4. Centres de loisirs et complexes touristiques :


Les établissements accueillant du public, comme les campings, hôtels en bord de mer, stations balnéaires et centres de thalassothérapie, peuvent utiliser le fauteuil pour améliorer l'accessibilité de leurs infrastructures aux personnes à mobilité réduite.

5. Lieux de baignade en eaux calmes :

Outre les piscines, le fauteuil est adapté aux baignades en lacs et lagunes, où ses caractéristiques amphibies permettent aux utilisateurs de flotter et d'entrer dans l'eau avec assistance.

Sécurité et accompagnement

Quel que soit le domaine d'utilisation, la présence d'un accompagnateur est obligatoire pour garantir la sécurité de l'utilisateur, notamment lors des déplacements et des mises à l'eau.

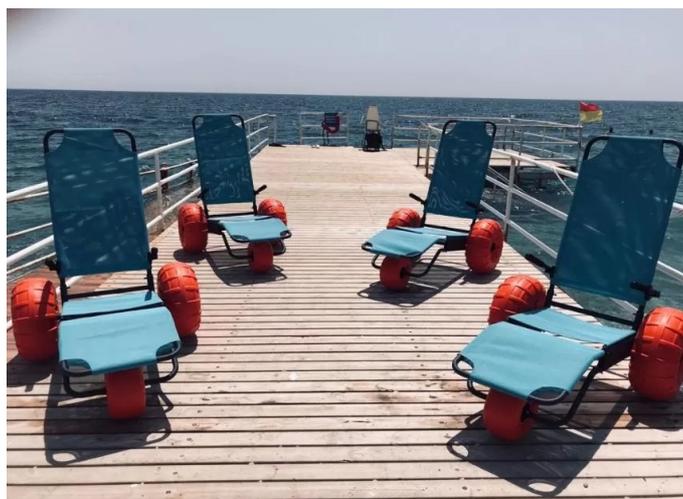

3. UTILISATION – MODE D'EMPLOI

Le fauteuil est spécialement conçu pour le déplacement des personnes à mobilité réduite sur des terrains meubles. Son utilisation requiert impérativement la présence d'un accompagnateur à chaque instant. N'est pas adapté aux intempéries ni à une utilisation dans une eau agitée. Il est idéal pour faciliter l'accès aux piscines, aux mers et aux lacs calmes.

Pour garantir leur sécurité, les utilisateurs sont vivement encouragés à porter un gilet de sauvetage dans l'eau. Il est également recommandé de consulter les réglementations locales et nationales concernant le port du gilet de sauvetage.

Limite de poids : le poids maximal supporté par le fauteuil est de 120 kg.

Précautions d'utilisation :

- N'utilisez pas les éléments du fauteuil à d'autres fins que celles prévues.
- Il est fortement déconseillé d'utiliser les pièces détachées pour soutenir des charges lourdes ou pour soulever le fauteuil. Une mauvaise utilisation pourrait entraîner un détachement des pièces et provoquer des blessures.
- Le fauteuil est conçu pour offrir confort et stabilité. Cependant, un transfert de poids excessif ou un terrain accidenté peut entraîner un renversement du fauteuil et des risques de blessures.
- Pour plus de sécurité, il est recommandé de toujours attacher la ceinture de sécurité lors des déplacements.



4. ATOUTS PRINCIPAUX

Le fauteuil se monte en moins de cinq minutes, sans nécessiter d'outils. Il est composé d'un châssis, d'un dossier et de deux roues, avec la possibilité d'ajouter une troisième roue en option. Son assemblage et son démontage s'effectuent en moins de 10 minutes, offrant ainsi une installation rapide et pratique.

- Cadre pliable et démontable sans nécessiter d'outils
- Châssis avec traitement anticorrosion
- Roues flottantes en polyéthylène, parfaites pour une utilisation sur le sable
- Large choix d'options disponibles : accoudoirs, ceinture de sécurité, troisième roue, ombrelle, etc.
- Solution économique et accessible
- Tissu adapté pour sécher rapidement
- Conforme aux normes d'accessibilité pour les gestionnaires de piscines et établissements touristiques
- Certifié selon les normes EN12182 CE et EN13485 CE

Le fauteuil de mise à l'eau constitue une solution parfaite pour répondre aux normes d'accessibilité des espaces de baignade.



5. CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Hauteur : 85 cm

Longueur : 105 cm

Largeur : 48 cm

Poids : 12 kg

Hauteur de l'assise : 34 cm

Profondeur d'assise : 39 cm

Capacité de charge maximale : 120 kg

Tissu résistant aux UV et à l'eau : matériel résistant à l'eau de mer

Roues : polyéthylène

Châssis : aluminium avec traitement galvanisé

Peinture époxy en poudre

Option : Possibilité d'ajustement du support des pieds suivant la taille de l'utilisateur

Option : sac de transport

5. GUIDE TECHNIQUE

MONTAGE :

Vous trouverez ci-dessous le guide de montage pour assembler votre fauteuil en quelques étapes simples. Avant de commencer, veuillez à vérifier que toutes les pièces sont bien présentes.

ETAPE 1 :

Fixez la barre de dossier rembourrée, le support rembourré et la barre de liaison à roulettes au châssis avec les goupilles de fixation comme indiqué sur le croquis. Fixez les roues au cadre principal comme illustré. Assurez vous que les tubes sont correctement verrouillés.




ETAPE 2 :

Insérez les roues sur l'axe du châssis comme indiqué sur le croquis. Utiliser le trou spécial sur le moyeu, préalablement aligné avec le trou présent sur l'axe du châssis et insérez l'attache. Assurez vous que chaque attache de roue est correctement verrouillée sur le moyeu.



ETAPE 3 :

Insérez le dossier dans les bagues du châssis, puis insérez les 2 attaches profondément à travers les trous appropriés pour le verrouiller. Assurez vous que les attaches sont correctement verrouillées sur le cadre principal. Ensuite, fixez la bande située sur l'extrémité inférieure du dossier, en la faisant passer autour de l'axe des roues comme sur le croquis.

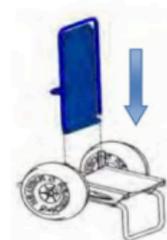


ETAPE 4 : Réglage du repose jambes

Pour régler la position du repose jambes, retirez les attaches comme sur le schéma. Placez le repose jambes dans l'une des trois positions disponibles et réinsérez les attaches.




ETAPE 5 : Barre anti basculement

Pour changer la barre anti basculement, retirez les deux attaches et tirez sur la barre. Insérez la nouvelle barre dans la même position et assurez vous d'insérer correctement les attaches.

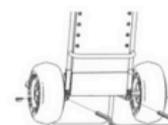

ETAPE 6 : Montage de la 3ème roue avant (option)

Pour monter la troisième roue, dévissez les deux boulons (L) à l'aide d'une clé Allen de 5 mm, agrandissez les deux tubes et retirez la roue. Insérez la roue, fixez les deux tubes et assurez vous de bien serrer les boulons précédemment retirés.

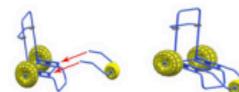

ETAPE 7 : Montage des accoudoirs (option)

Assemblez l'accoudoir (droit et gauche) au dossier comme indiqué ci-dessous. Pour assurer une connexion correcte, serrez les deux vis avec une clé Allen de 6 mm.



GARANTIE :

Le fauteuil pour une durée de deux (2) ans à compter de la date d'achat. Cette garantie couvre exclusivement les défauts de matériaux ou de fabrication.

Limitations de la garantie

La garantie ne s'applique pas aux dommages ou pièces affectés par :

- L'usure normale du produit
- Une surcharge excessive
- Une utilisation inappropriée, un entretien ou un stockage inadéquat
- Un accident ou une catastrophe naturelle
- Des modifications effectuées sans l'accord écrit d'Accessrec Europe
- Des réparations réalisées sans l'autorisation écrite d'Accessrec Europe
- Les frais de main-d'œuvre ou d'expédition liés aux réparations éventuelles

Conditions de retour et réclamations :

Si vous avez des préoccupations concernant la garantie ou les réparations effectuées, veuillez nous contacter directement. Aucun retour de produit ne sera accepté sans l'accord préalable de la société.

AVIS CLIENTS :

Trente ans après, ce fût merveilleux pour nous de voir Jeannette s'épanouir à nouveau dans la mer avec l'aide des fauteuils pour mise à l'eau. Nous avons transformé l'impossible en possible ! Les personnes à mobilité réduite peuvent désormais égayer leurs journées en allant à la plage, au parc ou encore au bord d'un lac.

Association Caritative Handisport

Le fauteuil est une solution économique et pratique pour accéder à ma piscine. Je suis très heureuse de mon achat.

Nicole Bodard